

PINCE MI ADHÉSIF : POUR MASQUES CHIRURGICAUX ET CERTAINS MASQUES TISSU




INSTALLATION

1.



2.

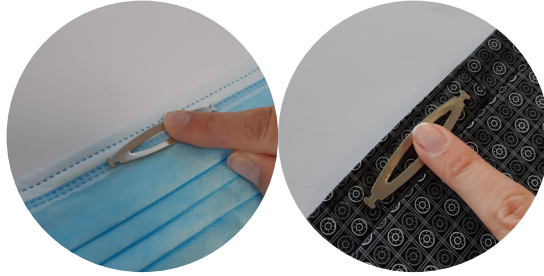

1. Ôter la protection du film autocollant du PINCE MI
2. Coller le PINCE MI à l'avant du masque sur la partie haute
En fonction de la matière des masques et des conditions d'utilisation, Pince Mi Adhésif peut parfois être repositionné sur plusieurs masques. Nous ne garantissons qu'un seul collage.

UTILISATION DU PINCE MI ADHÉSIF



3. Préformez le PINCE MI à l'aide de votre doigt.
Le PINCE MI doit être correctement plié (centré et pas trop pointu) sinon son efficacité est altérée.

× Non centré



× Trop pointu

Pliage correct



4. Installez le masque et ajustez le PINCE MI à la forme de votre nez en le pinçant

